

P-TEST

Urinuppsamling

P-testet lämpar sig bäst för färsk urin som kan samlas in när som helst under dygnet. Det är viktigt att du använder en torr och ren behållare. Förvara urinprovet i rumstemperatur och genomför testet inom två timmar.

För att samla upp urin så kan du antingen försöka ta tillfället i akt när du vet att stoet brukar kissa (t ex efter träning, vid utsläpp, fodring mm) eller kan du tillverka en uppsamlingsanordning som du fäster under svansen och ställa in stoet i en box i väntan på att hon ska kissa. En enkel sådan kan du tillverka av en avkapad plastflaska som du håller på plats i ett plastnät med snören eller stroppar fastsatta i täcket under svansen. (se bild på hemsidan)

Så här utförs testet

P-testet kan utföras på urinprov som är uppsamlat från 100:e dräktighetsdagen fram till en månad innan förväntad följning. Vi rekommenderar inte att testet utförs innan 100 dagar har passerats sedan sista bestämningsdagen. Utför testet i rumstemperatur och med bra belysning.

1. Urinprovet och P-testet bör förvaras 30 minuter i rumstemperatur innan testet utförs.
2. Tag ut nål och plastspruta från förpackningarna och sätt på nålen på sprutan.
3. Dra upp 1,5 ml urin i sprutan.
4. Stick nålen genom membranet i glasflaskan och töm sprutans innehåll (det ska nå upp till markeringen på flaskan).
5. Blanda innehållet med urinen genom att vända flaskan 3-4 ggr. Se till att de blå/lila kornen löses upp ordentligt.
6. Låt testet stå i rumstemperatur och läs av det efter 1 minut och 10 minuter enligt tabellen nedan:

Färg		Minuter	Resultat
Gulorange		1-10	Ej dräktig
Ljusgrön		10	Dräktig
Grön		10	Dräktig
Blågrön		10	Dräktig
Mörkblå		10	Dräktig

Om du är osäker på resultatet så råder vi dig till att vänta 10 dagar och sedan testa igen. Otydliga resultat är vanligare tidigt i dräktigheten samt vid gamla ston eller de som väntar föl för första gången, då hormonnivåerna kan vara något lägre. Vissa ston har en väldigt mörk eller till och med lite röd färg på urinen. I de fallen blir resultatet för ej dräktig lite mer åt det rödaktiga hållet än åt det gula. Avläs inte resultatet efter det att 10 minuter har passerat eftersom det kan skicka sig och åter bli urinfärgat efter ett tag.

Så här funkar det

P-testet fungerar genom att snabbt analysera förekomsten av dräktighetshormonet östronsulfat i urinen. Testet används från dygn 100-300 i dräktigheten. Tillförlitligheten är 97,4 % för dräktigt resultat och 94,4 % för ej dräktigt resultat. Förvara testet mörkt, svalt och torrt. Undvik fukt och starkt solljus.

Begränsningar och Garanti

P-TEST är framställt som ett diagnosiskt test för att fastställa dräktighetsstatusen för hästar. Det finns inga garantier, uttalade, antydda eller på annat sätt indikerade som sträcker sig utanför denna beskrivning av produkten. EMLAB GENETICS LLC eller Avelssto.se ansvarar inte för egendomsskada, person- eller hästskada eller ekonomisk förlust orsakad av denna produkt.

Garantin är begränsad till utbyte av ett defekt/icke fungerande test till ett nytt inom 30 dagar. Återsänd då det felaktiga testet med en kort beskrivning av vad du är missnöjd med så skickar vi dig ett nytt utan kostnad. En förutsättning för att garantin ska gälla är att testet är korrekt utfört enligt bifogade instruktioner. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på info@avelsto.se. Lycka till!