

Innehåll:

- Uppsamlingsburk med lock för att samla mjölkprov från stoet.
- Plastspruta 6 ml för uppmätning av destillerat vatten.
- Plastspruta 1 ml för uppmätning av mjölk.
- Flaska 100ml destillerat vatten.
- 1 provrör med lock.
- 15 provstickor.

Så här gör du:


Börja testa ditt sto ca 10 dagar före förväntad fölningsdatum. Gör testet en gång om dagen tills dess att kalciumnivån stigit till 120 ppm (40 % chans att stoet fölar inom 12 h). Därefter bör du testa stoet två gånger per dygn eftersom chansen till fölning stiger i takt med att kalciumhalten ökar

1. Samla in en liten mängd (1 ml) mjölk från stoet genom att mjölka ur en utav spenarna.
2. Mät noggrannt upp 6 ml destillerat vatten genom att använda plastsprutan och töm det i ett av provrören. Mät sedan upp 1 ml mjölk genom att använda plastsprutan och töm den i samma provrör.
3. Sätt på locket på provröret och skaka så att mjölken och vattnet blandas.

För att mäta kalciumhalten i mjölken ska du nu ta fram en provsticka ur plastpåsen. Rör inte vid den gula testplattan när du hanterat provstickan!

4. Doppa ned hela den gula plattan i mjölkblandningen under två sekunder. Tag ut provstickan och skaka av den så att överflödigt vätska försvinner.

Läs av färgen på plattan efter en minut och jämför med färgproven här nedan. Chansen att fölet kommer inom 12 timmar är:

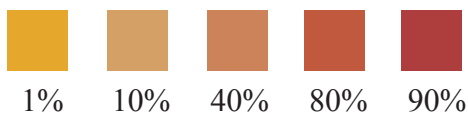

Om färgen på plattan ändras från gul till beige inom 1 minut så är troligtvis inte stoet redo att föla ännu. Om plattan ändras från gul till rostfärgad inom en minut så är det dags att titta till henne lite extra, men det innebär kanske inte att hon kommer att föla nästa dag. Om plattan går från gul till vinröd inom en minut finns det stora chanser att stoet kommer att föla inom ett dygn.

Generellt sett kan man säga att om färgen på provstickan inte ändras när testet genomförs så kan man vänta 2-3 dagar innan man testar igen, men håll alltid koll på andra tecken som kan indikera att fölning är nära förestående (juverstorlek, mjölkfläckage, förslappning i bäckenligamentet, vaxproppar mm).

Färgen och konsistensen på mjölken säger också en del om hur ofta man bör genomföra testet. Ljus, vattnig, lite genomskinlig mjölk brukar betyda att det dröjer ett tag innan fölning och om dessutom ingen färgförändring syns på provstickan kan man vänta några dagar innan man testar igen. Om mjölken däremot är riklig, vit och tjock men ingen färgförändring syns på testet så bör man ändå inte vänta mer än 24 timmar innan man återtestar.

En annan variabel att ta hänsyn till är hur snabbt färgen på plattan ändras. Ju snabbare färgförändringen sker mot det vinröda hållet desto närmare fölning är stoet.

De här provstickorna tillverkades ursprungligen i USA för att användas till att mäta hårdhetsgraden i vatten. Men eftersom det är just kalcium (och magnesium) som indikerar detta så började allt fler kunder använda dem till att förutspå fölning och de har sålts som mjölktest i mer än 20 år.

Begränsningar och Garanti

TimeToFoal är framställt som ett hjälpmedel för att kunna förutspå när ett sto skall föla. Testet är inte 100 % tillförlitligt utan skall ses som ett komplement till övriga tecken hos ditt sto på att fölningsstidpunkten närmar sig. Det finns inga garantier, uttalade, antydda eller på annat sätt indikerade som sträcker sig utanför denna beskrivning av produkten. Avelssto.se ansvarar inte för egendomsskada, person- eller hästskada eller ekonomisk förlust orsakad av denna produkt.

Garantin är begränsad till utbyte av ett defekt/icke fungerande test till ett nytt inom 30 dagar. Återsänd då det felaktiga testet med en kort beskrivning av vad du är missnöjd med så skickar vi dig ett nytt utan kostnad. En förutsättning för att garantin ska gälla är att testet är korrekt utfört enligt bifogade instruktioner. OBS! Utför aldrig testet med vanligt kranvatten eftersom det påverkar resultatet!

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på info@avelsto.se.

Lycka till!

Besök gärna vår hemsida www.avelsto.se där du finner intressant läsning om ditt avelssto samt har möjlighet att handla avelsrelaterade produkter i vår webshop, bl a dräktighetstest för hemmabruk.



TimeToFoal

Kalcium-mjölktest för att förutspå fölningsstidpunkt.

